

VIRTSANÄYTTEENOTTOASTIAN JA -NÄYTEPUTKEN KÄYTTÖOHJE



Näytteenottoastia

Ennen näytteenottoa, kierrä näytteenottoastian kansi auki koskematta astian sisäpintaan. Laita kansi tasolle tasainen (EI adapteri) puoli alaspäin. Ota näyte annettujen ohjeiden mukaisesti. Sulje näyteastian kansi ja poista kannessa oleva suojateippi. Varo näyteneulaa. Aseta näytteenottoastia tasaiselle alustalle.[Luetteloteksti]



Näyteputki

Paina näyteputki näytteenottoastian kannessa olevaan aukkoon korkkipää edellä, näyteneulaa vasten ja pohjaan saakka. Näyteputki täyttyy virtsanäytteellä, jonka jälkeen se otetaan pois kannen aukosta



Sekoita putkea kääntämällä sitä useasti ylösalaisin (ei ravistusta). Sulje näytteenottoastian kansi. Käytetyn näytteenottoastian voi hävittää sekajätteenä. Kirjoita näyteputken nimi ja henkilötunnus, sekä täytä annetun näytteenotto-ohjeen kohdat huolella.