

Huumenäytteen (virtsa) käsittely ja sinetöinti

Lue ensin läpi koko ohje. Kun sinetti on kerran kiinnitetty, sitä ei voi enää vaurioittamatta poistaa.

1. Poista pienet korkit putkista. Täytä kaksi putkea virtsalla vetämällä mäntä ylös.
2. Sulje putket uudelleen korkeilla. Katkaise männän varsi taittamalla
3. Kiinnitä potilastunnisteet näyteputkiin pystysuoraan, pitkä sivu keltaista katkoviivaa pitkin.
4. Kirjoita sinetteihin (A ja B) näytteenottopäivämäärä, allekirjoita molemmat sinetit ja pyydä niihin myös testattavan allekirjoitus.
5. Aloita sinetöinti painamalla sinetin logo osittain näytetunnisteen päälle. Vie **sinetti korkin yli** ja painele huolella putkeen kiinni
6. Kirjoita sinettinumero läheteeseen ja tarkista, että läheteessä ovat sekä testattavan että näytteenottajan allekirjoitukset. Laita sinetöidyt näyteputket salpapussiin, jossa on imuliina ja pakkaa putket niin, ettei sinetti vaurioidu kuljetuksen aikana. Samaan lähetyslaatikkoon voi pakata useampia näytteitä.

