

# Viivakooditunnisteen käyttö

Viivakooditarroja käytetään yhdistämään lähete ja näyte toisiinsa. Koodin neljä ensimmäistä numeroa ovat asiakasnumero ja loppuosa numerosarjasta on juokseva näytenumero.

**Yhden potilaan viivakoodit (5 kpl) ovat tarraliuskassa vaakasuorassa.**



Ensimmäinen tarra on ns. kantatarra, jossa on **kahdeksan numeroa**. Tämä numero merkitään sähköiseen läheteeseen, tai liimataan paperiläheteeseen, ei näyteputkeen.

Neljä muuta tarraa ovat kantanumeroltaan samat, mutta niissä on lisäksi lopussa juokseva numerosarja (01-04). Nämä **10-numeroiset koodit liimataan pystysuoraan näyteputkiin**.

**Hävitä mahdolliset ylimääräiset tarrat. Ota seuraavalle potilaalle käyttöön uusi tarranumerosarja seuraavalta vaakariviltä.**

## Lisätietoja:

Asiakasneuvonta  
045 7734 9040  
asiakasneuvonta@vita.fi