

Viivakooditunnisteen käyttö

Viivakooditarroja käytetään yhdistämään lähete ja näyte toisiinsa. Koodin neljä ensimmäistä numeroa ovat asiakasnumero ja loppuosa numerosarjasta on näyttenumero.

Yhden potilaan viivakoodit (5 kpl) ovat tarraliuskassa vaakasuorassa.



Viivakooditarran numerosarja merkitään sähköiseen läheteeseen, tai liimataan yksi tarra paperiläheteeseen. Toinen viivakooditarra liimataan pystysuoraan näyteputkeen. Yhden tarran voi käyttää omaan näytekirjanpitoon.

Hävitä ylimääräiset tarrat. Ota seuraavalle potilaalle käyttöön uusi tarranumerosarja seuraavalta vaakariviltä.

Lisätietoja:

Asiakasneuvonta
09 2288 00
asiakasneuvonta@vita.fi