

Tilaaja

Nimi: _____

Osoite: _____

Puh: _____

Sähköpostiosoite/osoitteet tulosten toimittamista varten:

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

**Mistä kuulit MADOTON?-
tutkimuksesta:**

sosiaalisesta mediassa
Google-mainoksesta
lehtimainoksesta
koirapuiston ilmoitustaululta
kaupan tai apteekin myyjältä
tapahtumassa
toiselta koiran tai kissan
omistajalta
muualta, mistä:

Näytetiedot

Eläimen nimi: _____ Eläimen ikä: _____

Eläinlaji (rastita oikea) Jos kissa, ulkoileeko vapaasti?
Kissa Koira Kyllä Ei

Onko ulosteessa näkynyt kokonaisia matoja tai madonkappaleita?
Kyllä Kyllä, laitettu mukaan näytepurkkiin. Ei

Näytteenottopäivät


Näyte 1 _____ Näyte 2 _____

Laboratorio täyttää

Tutkimus on tarkoitettu kissojen ja koirien sisäloislääkityksen tarpeen arvioimiseksi, kun tavoitteena on välttää perusteettomia rutiininomaisia matolääkityksiä. Tutkimusta ei suositella sairaiden lemmikkien oireiden syyn selvittämiseen. Mikäli kissallanne/koirallanne on sisäloistartuntaan viittaavia oireita, eläinlääkärin tulisi arvioida tutkimusten ja hoitojen tarve. Rutiininomaista, ulostetutkimuksen tuloksesta riippumatonta loislääkitystä suositellaan pennuille, tiineille ja imettäville emoille, matkaileville eläimille ja metsästäville/vapaana liikkuville eläimille.

Näytteenotto-ohjeet

- Näytteitä kerätään kaksi kappaletta eri ulostuskertoina.
- Näytteet kerätään näytepurkkeihin, joiden sisällä on formaliinia. **HUOM!** Lue ensin formaliinia koskevat turvallisuusohjeet sivun alaosasta.
- **Koira:** Kerää uloste esimerkiksi koirankakkapussiin. Uloste ei saisi päästä kosketukseen maaperän/mullan kanssa. Mahdolliset loiset säilyvät pussissa tunteja, joten pussin voi viedä kotiin ja ottaa näytteen siellä.
- **Kissa:** Kerää uloste hiekkalaatikosta mahdollisimman pian ulostamisen jälkeen. Vähäinen kissanhiekka-määrä ulosteen pinnalla ei haittaa analyysia, mutta poista se mahdollisimman tarkasti.
- Kirjoita valkoiseen tarralappuun eläimen nimi ja näytteenottopäivä ja liimaa tarra näytepurkkiin. Ota paketin mukana tullee puulastalla noin ruokalusikallinen (kuva 1) ulostetta. Laita ulostenäyte punakorkkiseen putkeen (kuva 2) ja sekoita puulastalla huolellisesti (kuva 3). Hyvin sekoitetussa näytteessä ei ole suuria nokareita ja se on puuromaista.
- **HUOM!** Jos havaitset ulosteessa matoja tai madon palasia, kerää ne/niitä purkkiin mukaan.
- Sulje korkki huolellisesti.
- Laita purkki takaisin samaan muovipussiin. Sulje pussi. Näyte säilyy huoneenlämmössä. Pakkaa näytteet sekä täytetty lähete laatikkoon ja toimita Vitaan.

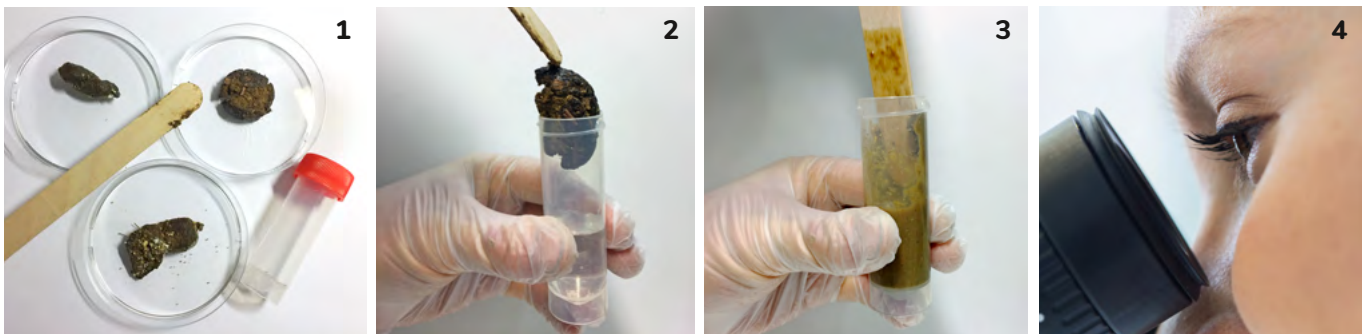

Näytteiden toimittaminen laboratorioon

Postitse

Kuljetuslaatikko on valmis lähetettäväksi maksikirjeenä postitse Vita Laboratorioon. Laatikossa on vastaanottajan osoite ja postimaksu on maksettu. Vie kuljetuslaatikko postilaatikkoon. Näytteet eivät saa jäätä, joten pakkasella vie laatikko postin toimipisteeseen.

Itse tuomalla Vita Laboratorioon

Vita Laboratorio, Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki
3. krs, vain hissillä
Näytteiden vastaanotto ma-to, klo 7:30 – 16:00

Näytteen kiinnittämällä käytetty formaliini on haitallista!

Formaliinin joutuessa iholle riisu saastunut vaatetus ja pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella sekä rasvaa iho. Formaliinin joutuessa silmiin huuhtelee silmät runsaalla vedellä 10–15 minuutin ajan ja mene välittömästi lääkäriin. Formaliinin joutuessa suuhun juo runsaasti nestettä ja mene välittömästi lääkäriin. Älä yritä oksentaa.