

# Hiusnäytteenotto, huumausainetestaus

Hiusnäytteenotto -lähete tulee täyttää ja asiakkaan tulee allekirjoittaa lähetteessä kysytty suostumus ennen näytteenottoa. Tärkeää on myös kirjata käytetty lääkitys koko hiusnäytteen edustavalta ajalta (1 kk/1 cm).

1. Noin lyijykynän paksuinen (n. 200 mg) hiusnäyte otetaan pääläen takaosasta (posterior vertex)
2. Mahdollinen B-näyte otetaan A-näytteen vierestä samalta alueelta.
3. Hiustuppo sidotaan metallilangalla ja leikataan saksilla <0.1 cm hiuspohjasta.
4. Hiusnäyte asetetaan alumiinifolionne niin, että hiusnäytteen tyviosa tulee ulos folion etuosasta.



5. Alumiinifolio suljetaan kuten kuvassa. Folio laitetaan salpapussiin, pussi sinetöidään ja pussin päälle liimataan potilaan näytetunnistetarra.
6. Salpapussi ja täytetty lähete suljetaan Vitan yhteystiedoilla (Vita Laboratoriot, Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki) varustettuun kirjekuoreen tai mustakeltaraidalliseen näytelähetyslaatikkoon, ja toimitetaan Vitaan.



*Pictures: European Guidelines for Workplace Drug and Alcohol Testing in Hair 2015-11-01 Version 2.0 (EWDTS)*