

Papilloomavirusnäyte näytteenotto, -hHPVhO (6445), -HPVPapa (lasipapa 12551)

Näyteastia ja tarvikkeet:




Näyteastia Roche Cell Collection Medium (sisältää 20 ml metanolia). Käyttöturvallisuustiedote saatavana laboratorion erillisellä pyynnöllä.



Näytteenottoharja Rovers® Cervex
Brush (yksittäispakattu)


Näytteenottotarvikkeet tilataan laboratorion kautta:
<https://vita.fi/tarviketilauskaavake>

Näytteenotto:

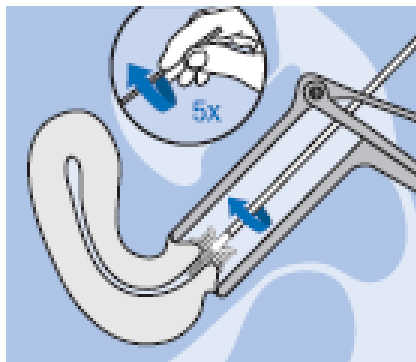

HPV-näyte otetaan naisilta yleensä kohdunkaulan / kohdunnapukan solunäytteestä. Näytteen ottamiseksi näytteenottoharjan keskimmäiset harjakset työnnetään kevyesti kohdunkaulakanavaan niin pitkälle, että näytteenottoharjan reunimmaiset lyhemmät harjakset taipuvat kohdunsuun limakalvoa vasten. Harjaa pyöritetään viisi kierrosta myötäpäivään solunäytteen keräämiseksi.

Naisilla, joilta on poistettu kohtu, näyte otetaan emättimen pohjasta. Testin onnistumisen edellytys on riittävä solumäärä.

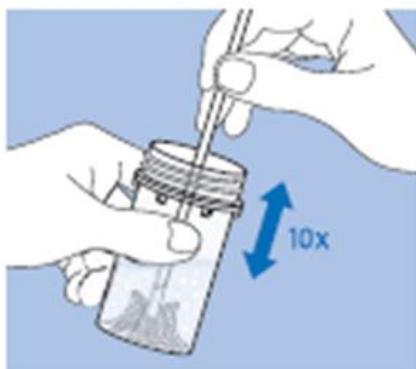

Näytteenoton jälkeen harjaa painetaan ja pyöritetään näytteenottopurkin pohjaan / pohjassa kymmenen kertaa (10x), jolloin solut irtoavat nesteeseen.

Tämä on tärkeä vaihe, jotta soluja saadaan riittävästi talteen.

Lopuksi näytteenottoharja hävitetään.



Näytteenottoastian korkki suljetaan huolellisesti merkkiviivaan saakka (tai hieman yli).

Näytteen säilytys ja lähetys

Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. Näyte säilyy Roche Cell Collection Medium -näytepurkissa +2°C – + 30°C lämpötilassa 6 kk. Näyte suositellaan lähetettäväksi laboratorioon mahdollisimman pian.