

Papilloomavirusnäyte naisilta hHPVNhO tutkimukseen

Papilloomavirusnäyte hHPVNhO tutkimukseen naisilta

Näyteastia ja tarvikkeet



Kuva 1. Näyteastia Roche Cell Collection Medium (sisältää 20 ml metanolia). Käyttöturvallisuustiedote saatavana laboratoriosta erillisellä pyynnöllä.




Kuva 2. Näytteenottoharja Rovers® Cervex Brush (yksittäispakattu)

Näytteenottotarvikkeet tilataan laboratoriosta sopimuksen mukaisesti (www.vita.fi).


Näytteenotto

HPV-näyte otetaan naisilta yleensä kohdunkaulan / kohdunnapukan solunäytteestä. Näytteen ottamiseksi näytteenottoharjan keskimmäiset harjakset työnnetään kevyesti kohdunkaulakanavaan niin pitkälle, että näytteenottoharjan reunimmaisat lyhemmät harjakset taipuvat kohdunsuun limakalvoa vasten. Harjaa pyöritetään viisi kierrosta myötäpäivään solunäytteen keräämiseksi (kuva 3). Naisilla, joilta on poistettu kohtu, näyte otetaan emättimen pohjasta. Testin onnistumisen edellytys on riittävä solumäärä.

Näytteenoton jälkeen harjaa painetaan ja pyöritetään näytteenottopurkin pohjaan/pohjassa kymmenen kertaa, jolloin harjaan tarttuneet solut irtoavat nesteeseen (kuva 4). Tämä on tärkeä vaihe, jotta soluja saadaan riittävästi talteen. Lopuksi näytteenottoharja hävitetään ja purkki suljetaan huolellisesti korkissa ja purkissa olevaan merkkiin saakka (kuva 5).

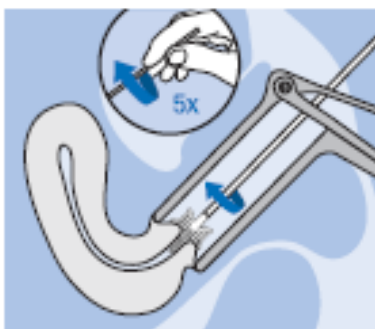

Kuva 3. Keskimmäiset harjakset työnnetään kevyesti kohdunkaulakanavaan niin pitkälle, että näytteenottoharjan reunimmaisat lyhemmät harjakset taipuvat kohdunsuun limakalvoa vasten. Kierretään 5 krt.

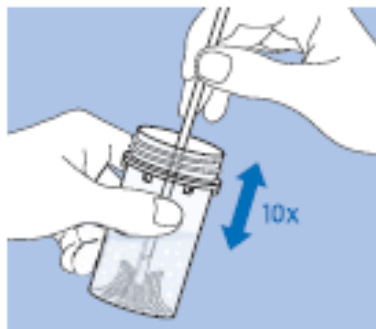

Kuva 4. Harjaa painetaan ja pyöritetään näytteenotto-purkin pohjaan / pohjassa kymmenen kertaa (10x), jolloin solut irtoavat nesteeseen. Lopuksi näytteenottoharja hävitetään.



Kuva 5. Näytteenottoastian korkki suljetaan huolellisesti merkkiviivaan saakka (tai hieman yli).

Näytteen säilytys ja lähetys

Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. Näyte säilyy Roche Cell Collection Medium -näytepurkissa +2°C – + 30°C lämpötilassa 6 kk. Näyte suositellaan lähetettäväksi laboratorioon mahdollisimman pian.