


-CV19NhO sylkinäytteenotto

Ennen sylkinäytteen ottamista pyydä asiakasta juomaan vettä n. puoli desilitraa suun huuhtomiseksi.

Sylkinäytekeräystarvikkeet (Zymo Research):

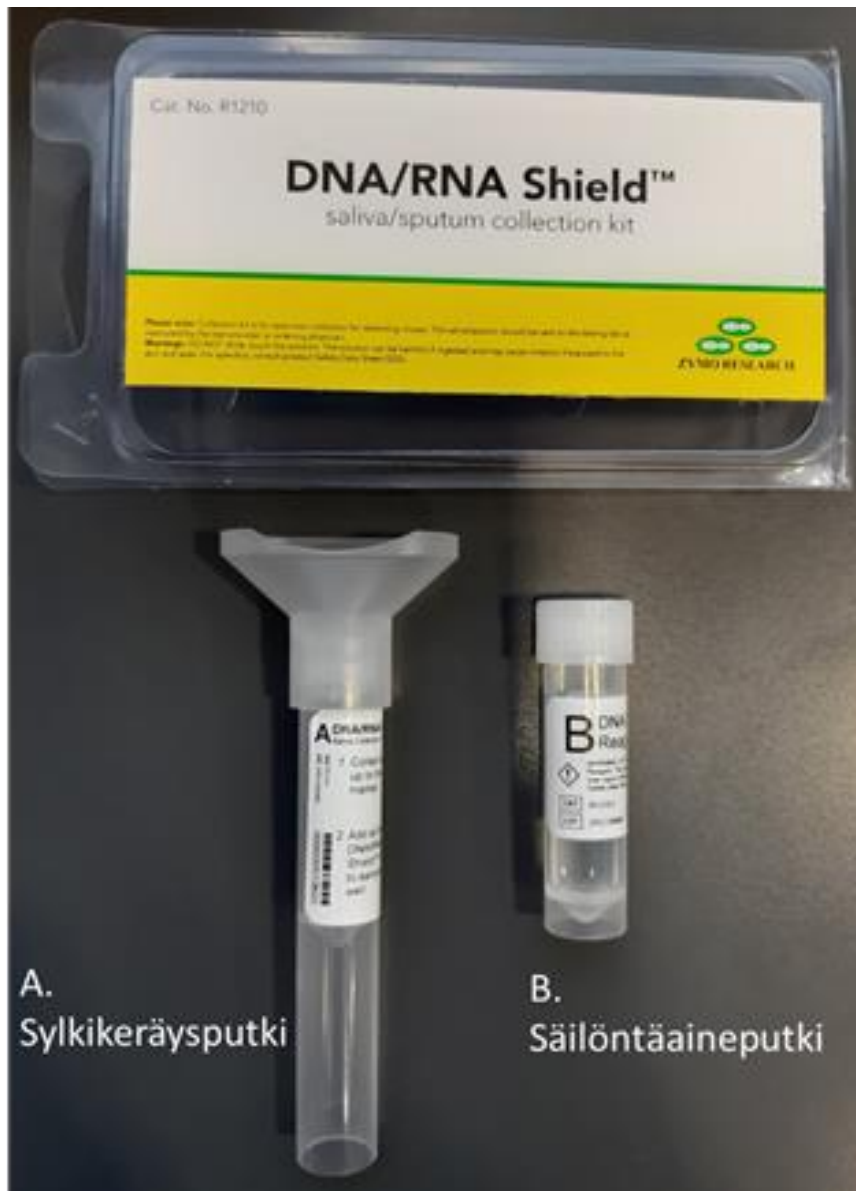

1. Syljen keräys:

Pyydä asiakasta valuttamaan suuhun kertyvää sylkeä **sylkikeräysputkeen A**, putkessa olevaan 1 ml merkkiviivaan asti. Tämä vie asiakkaalta keskimäärin noin minuutin.

2. Sylkinäytteen käsittely:

- Kaada putkeen A kerätyn syljen joukkoon **B-putken säilöntäaine**.

B-putken säilöntäaine on ihoa ja silmiä ärsyttävää. Sitä ei saa juoda tai koskea aineeseen paljain käsin.

- Poista sylkikeräysputken päästä suppilo ja korvaa tämä säilöntäaineputken korkilla.
- Kääntele korkilla suljettua sylkinäytettä 10 kertaa ylösalaisin.
- Suppilo hävitetään infektiovaarallisen jätteen mukana.

3. Näytteiden lähettäminen:

Näytteenoton yhteydessä aseta kukin näyteputki omaan salpapussiinsa, jossa on imumateriaalia (esim. selluloosavanua).

Putken ulkopuoli desinfioidaan esim. 70 % etanolilla ennen salpapussiin laittamista. Huomioi, ettei pussia saa kontaminoida käsittelyn aikana.

Sekä putkeen että salpapussin päälle liimataan tunnistetarra (viivakoodi ja/ asiakkaan henkilötunnisteet).

Pakkaa näytteet tartuntavaarallisten näytteiden tapaan, huomioiden voimassa olevat toimintaohjeet.

Laita pienet salpapussit edelleen suurempaan salpapussiin, jossa on sopivaa imumateriaalia, kirjoita pussiin "COVID Sylki".

Pakkaa näytepussit ulkopakkaukseen (kelta-mustaraidallinen pahvilaatikko) ja lisää ulkolaatikkoon tarrat UN3373 sekä BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B. Kirjoita myös ulkolaatikkoon tussilla " COVID Sylki ".

Sylkinäyteputki voidaan lähettää Vita Laboratorioihin huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena.