

# ULOSTEEN PARASIITIT, NUKLEIINIHAPPO, KVAL (F - ParaNhO)

- Ulosta wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki).
- Ota noin teelusikallinen ulostetta oheiseen näytepurkkiin korkissa olevan lusikan avulla. Sulje purkki huolellisesti.
- Kirjoita oheiseen tarralappuun nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä ja liimaa tarra näytepurkin kylkeen.
- Laita näytepurkki salpapussiin ja sulje pussi huolellisesti.
- Täytä huolellisesti kaikki tämän lomakkeen kohdat.
- Toimita näyte ja tämä lomake täytettynä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet

**Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:**

**Nimi:** \_\_\_\_\_

**Henkilötunnus:** \_\_\_\_\_

**Näytteenottopäivämäärä:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Tiedustelut:**