

## Huumenäytteen (virtsa) käsittely ja sinetöinti

Lue ensin läpi koko ohje. Kun sinetti on kerran kiinnitetty, sitä ei voi enää vaurioittamatta poistaa.

1. Poista pienet korkit putkista. Täytä kaksi putkea virtsalla vetämällä mäntä ylös yläreunan merkkiviivaan asti. Nosta putki pystyasentoon (korkkipää ylös) ja vedä mäntä pohjaan asti alas.
2. Sulje putket uudelleen korkeilla. Katkaise männän varsi taittamalla
3. Kiinnitä potilastunnisteet näyteputkiin pystysuoraan, pitkä sivu keltaista katkoviivaa pitkin.
4. Aloita sinetöinti painamalla sinetin logo osittain näytetunnisteen päälle. Vie **sinetti korkin yli** ja painele huolella putkeen kiinni.

Laita sinetöidyt näyteputket salpapussiin, jossa on imuliina ja pakkaa putket niin, ettei sinetti vaurioidu kuljetuksen aikana. Kirjoita sinettinumero paperilähetteeseen.

