

# Kokoverinäytteiden pakkaaminen kovilla pakkasilla

Kokoverinäytteiden, jotka eivät saa jäätyä (esimerkiksi B-PVK 2473), valmistelu postitusta varten alle -10 °C:een pakkasella vaatii erityispakkaamista. Näytteen jäätyminen lähetyksen aikana saattaa johtaa selvästi virheellisiin tuloksiin.

**Tämän ohjeistuksen mukaan yhteen lähetykseen mahtuu enintään 5 näyteputkea.**

1. Pakkausmateriaalit: 2 kpl huoneenlämpöisiä geelejä, 2 kpl imuliinoja, iso ja pieni Minigrip-pussi, styrox-laatikko ja lähetyslaatikko.
2. Laita pienessä Minigrip-pussissa olevat huoneenlämpöiset näytteet kahden huoneenlämpöisen geelin väliin.
3. Kääri geelien välissä olevat näytteet kahteen imuliinaan ja laita paketti isompaan Minigrip-pussiin.



4. Purista pussista ylimääräiset ilmat pois ja aseta näytelähetys styrox-laatikkoon.
5. Laita styrox-laatikko pahvilaatikkoon. Valmistelemme pahvilaatikko postitusta varten.

