


22/06/2022

-CV19NhO sylkinäytteenotto

Ennen sylkinäytteen ottamista pyydä asiakasta juomaan vettä n. puoli desilitraa suun huuhtomiseksi.

Sylkinäytekeräystarvikkeet DNA/RNA Shield™ Saliva/Sputum Collection Kit (Zymo Research):

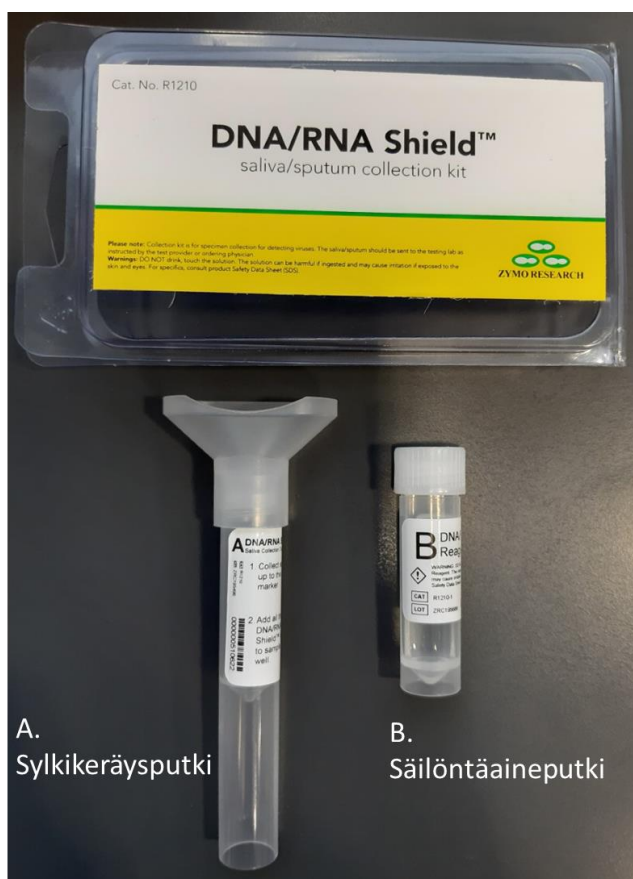

22/06/2022



1. Syljen keräys:

Pyydä asiakasta valuttamaan suuhun kertyvää sylkeä suppilolliseen **sylkikeräysputkeen A** putkessa olevaan 2 ml merkkiviivaan asti.

2. Sylkinäytteen käsittely:

- Kaada **B-putken säilöntäaine** putkeen A kerätyn syljen joukkoon.

B-putken säilöntäaine on ihoa ja silmiä ärsyttävää. Se ei saa joutua kosketuksiin ihon tai limakalvojen kanssa.

- Poista sylkikeräysputken A päästä suppilo
- Suppilo hävitetään infektiovaarallisen jätteen mukana
- Käytä näyteputkessa säilöntäaineputken B korkkia.
- Sekoita korkilla suljettua sylkinäytettä kääntelemällä sitä 10 kertaa ylösalaisin.

3. Näytteiden pakkaaminen ja lähettäminen:

Putken ulkopuoli desinfioidaan 70 % etanolilla ennen salpapussiin laittamista. Huomioi, ettei pussi saa kontaminoitua käsittelyn aikana. Aseta kukin näyteputki omaan salpapussiinsa, jossa on imumateriaalia (esim. selluloosavanua).

Sekä putkeen että salpapussin päälle liimataan tunnistetarra (viivakoodi ja/asiakkaan henkilötunnisteet).

Pakkaa näytteet tartuntavaarallisten näytteiden tapaan, huomioiden voimassa olevat toimintaohjeet.

Laita pienet salpapussit edelleen suurempaan salpapussiin, jossa on sopivaa imumateriaalia, kirjoita pussiin "**COVID Sylki**".

Pakkaa näytepussit ulkopakkaukseen (kelta-mustaraidallinen pahvilaatikko) ja lisää ulkolaatikkoon tarrat UN3373 sekä BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B. Kirjoita myös ulkolaatikkoon tussilla "**COVID Sylki**".

Sylkinäyteputki voidaan lähettää Vita Laboratorioon huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena.