

# Surepath nestepapa näytteenotto, Pt-Papa-1 (4044), -HPVRf (10143), - HPVPa (10632)

## Näyteastia ja tarvikkeet:


BD Surepath näyteastia sekä Rovers Cervex-Brush®-harja, endocx harja sekä muovilasta. Harjat ovat ns tehdaspuhtaita.



SurePath näytteenotto on suunniteltu tehtäväksi yhdellä harjalla, jolla samalla kertaa tulee sekä ekto- että endokerviksin näytteet. Halutessa näyte voidaan ottaa myös perinteisillä näytteenottovälineillä käyttäen erillistä endokerviks harjaa ja muovilastaa.

Näytteenottotarvikkeet tilataan laboratorion kautta:  
<https://vita.fi/tarviketilauskaavake>

## Näytteenotto:

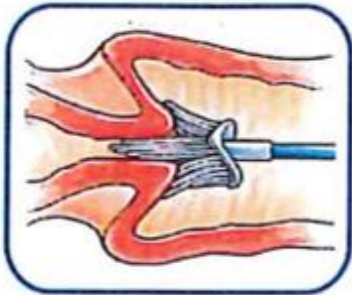

1. Aseta harjan keskiharjakset kanavaan.

2. Pyöritä Cervex-Brush®-harjaa viisi kertaa myötäpäivään painaen kevyesti.



3. Laita Cervex-Brush®-harja SurePath TM näyteastian suurempaan aukkoon. Katkaise harjan pää näyteastiaan tukemalla harjapäästä purkin reunaan ja vetämällä sininen varsiosa irti.

Valkoinen harjapää tulee jättää näyteastiaan. Mikäli otit näytteen tavallisella harjalla, heiluttele harjaa näytepurkissa. Näyteastiaan jätetään ainoastaan Cervex-Brush®-harja SurePath. Sulje näyteastian korkki huolellisesti.



**HUOM! Näytetarraa ei saa liimata astian pohjassa olevan syvennyksen tai kannen päälle.**



Viivakoodillinen näytetarra tulee liimata näyteastiaan vaakasuoraan siten, että tarra peittää purkissa olevat pienet qr-koodit. Näin tarra mahtuu hyvin näyteastiaan ja potilaan tiedot ovat robotin luettavissa.