

# Näytteiden pakkaaminen lämpimillä säillä

Arvoisa asiakas,

Lämpimillä säillä näytelähetykset tulee pakata niin, ettei niiden kuljetuslämpötila pääse kohoamaan yli +25 asteen. Käytättehän tarvittaessa kylmäkuljetusettä ja jääkaappilämpöisiä kylmävaraajia. Kesäaikaan verenkuvanäytteet pyydetään säilyttämään jääkaapissa ja lähettämään kylmägeelien kanssa.

Tulosten tulkinnassa on hyvä tiedostaa lämpimän sään mahdolliset vaikutukset. Esimerkiksi punasolujen tilavuus (MCV) suurenee nopeasti näytteen ollessa lämpimässä.

## Lisätietoja

Logistiikka  
puh. 045 7734 9060  
[aija.rantala@vita.fi](mailto:aija.rantala@vita.fi)