

# S -Kylmähemagglutiniinit: näytteen käsittely ja lähetys

## Arvoisa asiakas,

Pyydämme huomioimaan tutkimuksen kylmähemagglutiniinit, S -Kyhemag KL 2173, näytteen käsittelyn ja lähetyksen. Suosittelemme erottelemaan seerumin jo näytteenottoaikassa ja toimittamaan näytteen tutkivaan laboratorioon lämpöeroteltuna seeruminäytteenä.

Kokoverinäyte säilytetään +37°C :ssa, kunnes seerumi on eroteltu. Erottelu tehdään +37°C :ssa. Erottelu voidaan toteuttaa mm. lämpöhaudetta hyödyntämällä. Kun seerumi erotellaan jo näytteenottoaikassa, voidaan seeruminäyte säilyttää ja toimittaa + 4 °C :ssa ja toimittaa tutkivaan laboratorioon joko +4 °C :ssa tai huoneenlämpöisenä.

1.11.2023 alkaen otamme S -Kryo-O ja S -Kryog toimitettavia kokoverinäytteitä vain niiltä asiakkailta, joiden kanssa on menettelyt ja lähetys on erikseen varmistettu ja sovittu.

Tarkemmat näytteenotto- ja käsittelyohjeet löytyvät laboratoriokäsikirjastamme ([www.vita.fi](http://www.vita.fi)).

## Lisätietoja

Päivi Mähönen  
FT, Sairaalamikrobiologi  
045 7734 9028  
[paivi.mahonen@vita.fi](mailto:paivi.mahonen@vita.fi)

Taru Meri  
FT, osastopäällikkö  
044 018 5731  
[taru.meri@vita.fi](mailto:taru.meri@vita.fi)

Sakari Jokiranta  
Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri  
050 547 1184  
[sakari.jokiranta@vita.fi](mailto:sakari.jokiranta@vita.fi)