

# Muutoksia B- PEth säilyvyyteen ja lähetyksiin (kl 12510)

Arvoisa asiakas,

Kokoveren fosfatidyylieetanolimäärityksen (B -PEth) näytteiden säilyvyys- ja lähetysohjetta päivitetään seuraavasti:

## **Säilyvyys:**

Säilyy jääkaapissa (2-6 °C) 1 viikon ajan. Näyte lähetettävä laboratorioon heti näytteenoton jälkeen.

Säilyy huoneenlämmössä 1-2 päivää. Jos näyte ei ole laboratoriossa vuorokauden kuluessa, lähetyksen kylmälähetys.

## **Huom!**

Näytettä ei saa säilyttää pakastettuna -20 C:ssa.

Jos pitkäaikainen säilytys on tarpeen, pakastetaan näyte välittömästi -80 °C:een ja säilytetään pakastettuna -80 °C:ssa, jossa se säilyy jopa 4 viikkoa. Tällöin lähetyksen pakastettuna ja säilytyslämpötila selkeästi merkittynä lähetykseen.

## **Lisätietoja**

Esa Hämäläinen  
LKT, prof., kliinisen kemian ylilääkäri  
+358 40 922 1341  
[esa.hamalainen@vita.fi](mailto:esa.hamalainen@vita.fi)

Terhi Launiainen  
FT, Massaspektrometrian vastuukemisti  
+358 40 922 4816  
[terhi.launiainen@vita.fi](mailto:terhi.launiainen@vita.fi)