

Provtagning för papillomvirus -hHPVNhO (6445), -HPVPapa (12551)

Provburch och tillbehör:




Provburchen är Roche Cell Collection Medium (innehåller 20ml vätska, som innehåller metanol). Säkerhetsdatablad kan förfrågas från laboratoriet.



Provtagningsburchen Rovers® Cervex Brush (enskilt packade)


Material för provtagning beställs från laboratoriet:
<https://vita.fi/tarviketilauskaavake>

Provtagningen:

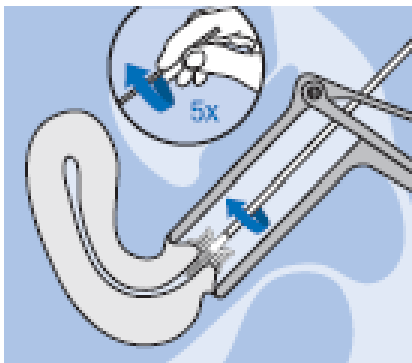

HPV-provet tas av kvinnor ofta ur cellprov från livmoderhalsen / livmodertappen. För att ta provet, förs provtagningsborstens mittersta borstar försiktigt in i livmoderhalsen så långt att de kortare borstarna träffar livmodertappen och böjs mot slemhinnan. Cellprovet tas genom att snurra borsten fem rundor medsols.

Kvinnor, vars livmoder är borttagen, tas cellprovet ur slidans botten. För ett lyckat testresultat krävs en tillräcklig mängd celler.

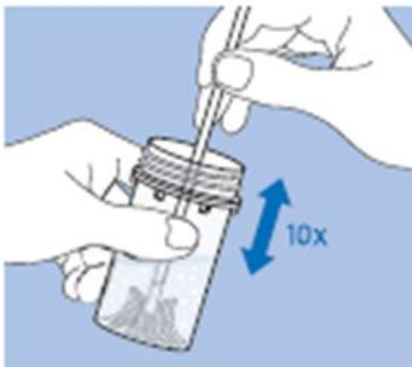

Efter provtagningen trycker och snurrar man borsten mot provburkens botten 10 gånger (10x), så att cellerna frigörs i vätskan.

Detta är ett mycket viktigt skede av provtagningen, som möjliggör en tillräcklig mängd celler för analys.

Till slut kan provtagningsborsten slängas.



Provburens kork stängs ordentligt ända till referensmärket (eller lite över det).

Förvaring och returnering av provet:

Provet förvaras och skickas till laboratoriet i rumstemperatur. Provet hålls analyserbart i Roche Cell Collection Medium -burken i +2°C – +30°C i 6 mån. Provet rekommenderas att skickas till laboratoriet så snabbt som möjligt.