

Verenkuvanäytteiden lähetys kesäkuukausina

Arvoisa asiakas,

Pyydämme teitä kesäkuukausina lähettämään perusverenkuva-, erittelylaskenta- ja retikulosyyttinäytteet styrox-laatikkoon kylmägeelien kanssa pakattuna näytteiden säilyvyyden varmistamiseksi. Jääkaappilämpöinen näyte tulee pakata jääkaappilämpöisten kylmägeelien kanssa styrox-laatikkoon. Näin varmistetaan, että näytelähetyksen lämpötila ei kohoa liian suureksi, esimerkiksi punasolujen keskitilavuus (MCV) suurenee nopeasti lämpimässä.



Lisätietoja

Mikko Helenius
FT, sairaalakemisti
0409225301
mikko.helenius@vita.fi