


Endotest näytteenotto-ohje

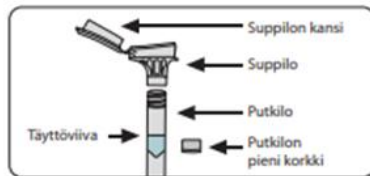

Käyttötarkoitus: OMNigene™-ORAL on tarkoitettu nukleinihaponäytteen ottoon ja stabilointiin syljestä.

Sisältö: 1 pakkaus, joka sisältää 1 min stabilointinestettä.

Varoitukset ja varotoimet: Pese vedellä, jos stabilointinestettä roiskuu silmiin tai iholle. Ei saa niellä. Käyttöturvallisuustiedote on osoitteessa www.dnagenetek.com.

Pieni korkki voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Ilmoita kaikista vakavista haittatapauksista DNA Genetekille ja maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Säilytys: 15°C ÷ 30°C

Pakkauksen yhteenveto ja selitys:

OMNigene™-ORAL on näytteenottopakkaus, jossa on materiaalit ja ohjeet sylkinäytteen ottoon, stabilointiin ja ylläpitoon kuljetuksen aikana.

Näytteenoton varotoimet:

Pese kätesi. Älä käytä, jos olet sairas (infektio). Älä juo, syö, tupakoi, pureskele purukumia, käytä huulipunaa, harjaa hampaitasi tai huuhtelee suutasi 30 minuuttia ennen näytteenottoa (käytä mieluummin aamulla ennen ruokailua).

ÄLÄ irrota muovikalvoa suppilon kannesta.

Tuotetarran teksti:

CE	Luettelonumero
CE	CE-merkintä
UKCA	UKCA-merkintä
MD	Diagnostinen in vitro -lääkinnällinen laite
Q	Ei saa käyttää uudelleen
Q	Katso pakkausseloste
Q	Huomio, lue käyttöohjeet
Q	Valmistaja
Q	Euroopan valtuutettu edustaja
Q	Sveitsin valtuutettu edustaja
Q	Ota näyte viimeistään (viimeinen käyttöpäivä)
Q	Eränumero
Q	Yksilöllinen laitetunniste
Q	Maahantuoja (Eurooppa)
Q	Säilytysohjeet
Q	Sisältö riittää 1 testiin



DNA Genetek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Maksuton (Puhelin-Amerikka): 1.866.813.6354
Tel: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenetek.com
www.dnagenetek.com

Erinomaiset näytteet
Todistettu teho

OMNigene™-ORAL -sylkinäytteenotolaite
OME-505.005, maahantuoja Ziwig
19 rue Riboud, 69003 Lyon, Ranska
service@ziwig.com

KÄYTTÖOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen näytteenottoa.



Toimintaohjeet:

Suurimmalta osalta ihmisiä kestää 2–5 minuuttia antaa sylkinäyte vaiheiden 1–5 mukaisesti.



1 Sylje suppiloon, kunnes nestemäistä sylkeä (ei ilmakuplia) on kuvassa 1 ja pakkauksen näytteenoton varotoimissa esitettyyn täyttöviivaan asti.



2 Pidä putkiloa pystyssä yhdellä kädellä. Sulje suppilon kansi toisella kädellä (kuten kuvassa) painamalla kanta lujasti, kunnes kuulet voimakkaan napsahduksen. Kannessa oleva neste vapautuu putkiloon ja sekoittuu näytteen kanssa. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.



3 Pidä putkiloa pystyssä. Kierrä suppilo irti putkilosta.



4 Sulje putkilo tiukasti pienellä korkilla.



5 Ravista korkilla suljettua putkiloa 5 sekunnin ajan. Hävitä tai kierrätä suppilo.

Kerätty näyte on mahdollisesti tartuntavaarallista, ja sitä on käsiteltävä asianmukaisten bioturvallisuuskäytäntöjen mukaisesti. Lähetä sovellettavien biologisten näytteiden kuljetusta koskevien määräysten mukaisesti.

EC REP Qead EC REP BV, Pas 257, 3440 Geel, Belgia

CN REP Qead Suisse SA, World Trade Center, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Sveitsi

Vastuukäyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Qead UK Ltd, 8 Northumberland Ave, Westminster, Lontoo, WC2N 5BY
Yhdistynyt kuningaskunta

OMNigene ja DNA Genetek ovat tavallisia laimäädäntöalalla DNA Genetek Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Jotkin DNA Genetekin tuotteet eivät ehkä ole saatavissa kaikilla maantieteellisillä alueilla. Lisätietoja saat myyntiedustajalta. Kaikki DNA Genetekin ohjelmat, tekniikat, tiedotteet ja sovellukset koskevat huomautukset ovat saatavana verkkosivuiltamme osoitteessa www.dnagenetek.com

Patentti www.dnagenetek.com/legal/notices/

© 2025 DNA Genetek Inc., OraGene Technologies, Inc:n tytäryhtiö, kaikki oikeudet pidätetään. PD-PB-1461 v1/2025-02